

LA POSE DE L'ORTHESE –AIDE MEMOIRE



➤ PREPARATION INITIALE

Asseyez-vous sur le bord d'une chaise stable et placez votre genou en position droite, les orteils pointant vers votre nez (A).

Attachez les sangles pour pas qu'elles vous gênent lors de l'installation (B).



➤ ALIGNEMENT DE EVOKE

Alignez le centre des charnières avec le centre de votre genou (C). Poussez la partie inférieure de l'orthèse vers le haut jusqu'à ce qu'elle se bloque contre vos jambes (D).



➤ SANGLE #1

Attachez la sangle n° 1, postérieure au niveau du tibia. Elle maintiendra l'orthèse en place (E).



➤ SANGLE #2 ET #3

Attachez la sangle postérieure n°2 au-dessus du pli du genou (F).

Fixer la sangle n° 3 (Si présente) au bord inférieur de la partie tibiale (G).



➤ SANGLE #4 ET #5

Attachez la sangle n°4 au bord supérieur de la cuisse (H).

La sangle n°5 (si présente) est préajustée par votre clinicien et doit toujours rester attachée (I).



➤ DERNIER AJUSTEMENT

Afin de vérifier l'ajustement et le confort de votre EVOKE™, marchez ou effectuez plusieurs flexions (J).

Ajustez la tension des sangles (si nécessaire).

Evoke™



UN MOT DE L'ÉQUIPE !

BIENVENUE DANS LA FAMILLE OSSKIN !

L'ÉQUIPE D'OSSKIN S'EST DONNÉ COMME OBJECTIF DE RENDRE LE PORT DE VOTRE ORTHÈSE LE PLUS AGRÉABLE ET CONFORTABLE POSSIBLE, TOUT EN RÉDUISANT SIGNIFICATIVEMENT VOTRE DOULEUR.

C'EST APRÈS PLUS DE 15 ANS DE R&D, D'IMPORTANTES BREVETS ET D'INNOMBRABLES TESTS CLINIQUES QUE EVOKE™ A VU LE JOUR.

C'EST POURQUOI NOUS SOMMES FIERS DE VOUS OFFRIR EVOKE™, L'ORTHÈSE LA PLUS LÉGÈRE ET LA PLUS DISCRÈTE AU MONDE.

UNIQUE

SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE ORTHÈSE EVOKE™ A ÉTÉ FABRIQUÉE PAR UN PROCESSUS DE FABRICATION D'IMPRESSION 3D QUI A ÉTÉ DÉVELOPPÉ DANS L'INDUSTRIE AÉROSPATIALE.

LE TOUT POUR EN FAIRE UN PRODUIT HAUTEMENT SUR MESURE QUI RESPECTE PARFAITEMENT VOTRE PROFIL ANATOMIQUE.

EN TRAVAILLANT AVEC CETTE HAUTE TECHNOLOGIE CELA NOUS PERMET D'OBTENIR UN MAXIMUM DE COMPLEXITÉ GÉOMÉTRIQUE, TOUT EN ASSURANT UN NIVEAU SUPÉRIEUR DE SUPPORT ET DE CONFORT ET UNE PRÉCISION IMBATTABLE.

VOTRE JAMBE ET VOTRE DOULEUR SONT UNIQUES, NOUS VOULONS VOUS OFFRIR UN PRODUIT QUI L'EST ÉGALEMENT.

ASYMMOTION HINGE SYSTEM

Pour des raisons de sécurité l'articulation doit être démontée uniquement par votre professionnel orthésiste.

Vérifiez régulièrement qu'aucun corps étranger ne s'est déposé dans l'articulation de votre EVOKE™; Nettoyez l'articulation à l'eau propre ou à l'air comprimé.

Ne jamais huiler l'articulation. Si l'articulation ne fonctionne pas normalement, elle doit être réparée par votre professionnel orthésiste.

NETTOYAGE

L'eau salée, le sable et toute saleté peuvent endommager votre produit. Rincez rigoureusement à l'eau propre après une exposition à ces conditions.

Lavez à la main avec un savon doux non détergent. Rincez soigneusement à l'eau froide et laissez sécher à l'air.

ASTUCES

Appliquez votre EVOKE™ directement sur la peau, un legging ou un collant.

Ne porter pas votre produit par-dessus un pantalon rigide.

Lors d'activité sportive ou physique, le port d'un legging ou d'une gaine est suggérée et doit être porté sous votre EVOKE™. Ne pas appliquer trop de tension sur les sangles fémorales #2 et #3.

GARANTIES

› STRUCTURE/MECANISME : 5 ANS

› COUSSINAGE : 6 MOIS

› SANGLE : 6 MOIS

OssKin garantit tous ses produits à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériel et de fabrication. L'usure normale lors de l'utilisation n'est pas considérée comme un défaut.

Si EVOKE™ est modifié par une personne autre que votre professionnel orthésiste ou votre médecin, il perdra sa garantie. Contactez votre professionnel orthésiste pour plus de détails.

PRECAUTION !

Si vous ressentez des douleurs anormales, un changement de sensations ou des réactions inhabituelles en utilisant EVOKE™, contactez votre professionnel orthésiste ou consultez un médecin.

